




Презареждаем
слухов усилвател

Инструкции
и за
употреба



MODEL VHP 1303

Представяне на продукта

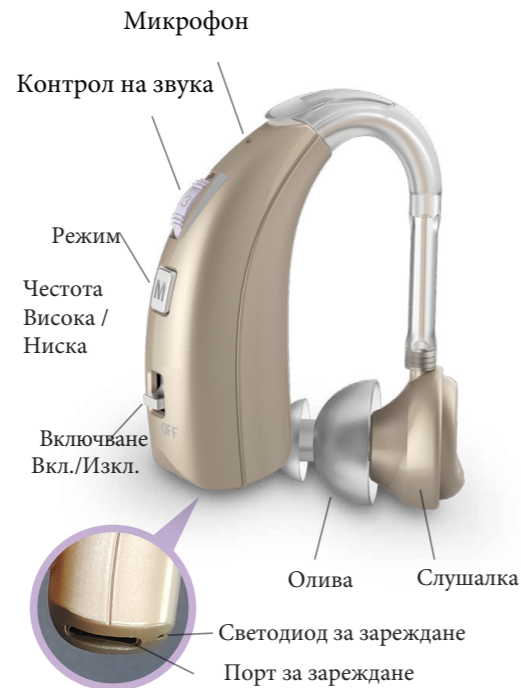

При първа употреба се препоръчва пълно зареждане на усилвателя. (Време: около 1.5 часа)

Съдържание на пакета

VHP-1303 Аксесоари, включени в опаковката с 1 брой:



Дигитален слухов усилвател x 1



Четка за почистване x 1



Оливи x 3



USB кабел тип C x 1



Упътване x 1

VHP-1303 Опаковка с 2 броя:



Дигитален слухов усилвател x 2



Четка за почистване x1



Оливи x 6




USB кабел тип C x 1



Упътване x 1

Инструкции за употреба

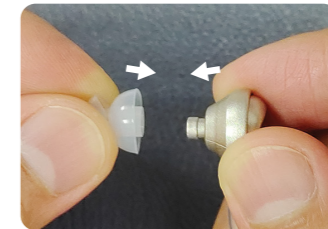

1
Изберете подходяща олива за вашето ухо, която осигурява перфектно уплътнение.



2
Тръбичката може да се завърти наляво или надясно, за да пасне на всяко ухо.



3
Поставете устройството плътно в ухото, за да избегнете микрофонията.



4
Настройте звука на минимум и след това включете устройството.



5
Регулирайте звука до желаното ниво или използвайте бутон M за повишена или пониска сила на звука.



6
Изключете и заредете устройството за следваща употреба.

Правилна работа

1. Изберете подходяща олива, която осигурява плътно уплътнение. Така ще избегнете микрофония и остри звуци.



2. Поставете продукта в ухото, както е показано на изображението.



3. Включете усилвателя.
4. Настройте звука на минимум преди употреба.
5. Изберете режим на работа – М.
6. Регулирайте звука плавно до желаното ниво.
7. Уверете се, че сте изключили устройството след употреба.
8. Заредете устройството за следваща употреба.

Смяна на режима -М-


Натиснете бутона (М), за да изберете нормален режим или режим с висока честота.

Смяната на режима осигурява правилната честота за по-добро усилване.

Устройството се стартира автоматично в нормален режим.

Нормален режим (Подходящ при тиха обстановка)

Когато се намирате в среда с ниско ниво на шум – като например в парк, при разходки или у дома – нормалният режим е препоръчителен.

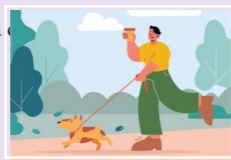


Високочестотен режим (Подходящ за шумна среда)

Подходящ при пътуване и шум. Фоновият шум е нормален.



Инструкции за зареждане

1. Изключете устройството и свържете кабела за зареждане от комплекта.
2. Включете адаптера в контакта.

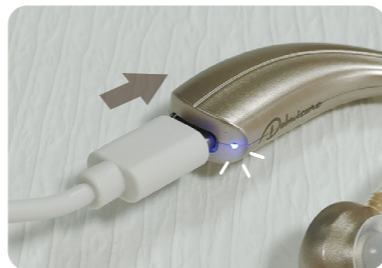

3. Синият индикатор показва, че устройството се зарежда. При пълно зареждане светлината става зелена. Време за зареждане – около 1.5 часа.
4. Ако устройството не е изключено преди зареждане, ще се покаже червена светлина, която показва, че ще се изключи и няма да се зарежда.
5. Зареждайте устройството периодично, за да запазите батерията и да удължите живота.
6. Забранено е използването на зарядно директно към 110V–220V~50–60Hz.
7. Незабавно прекратете зареждането при миризма, дим или деформация.
8. Батерията ще запази около 60% от първоначалния си капацитет след 300 цикъла на зареждане-разреждане.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможни решения
Изкривен звук	Намалете звука Заредете устройството Почистете оливата от ушна кал
Слаб звук	Заредете устройството Почистете микрофона Проверете оливата за запушвания
Микрофония или постоянен писък	Поставете отново оливата Уверете се, че устройството е плътно поставено в ухото Намалете звука
Липса на звук	Проверете оливата Проверете целостта на устройството Уверете се, че продуктът няма повреди или пукнатини

Технически данни

MODEL	ITEM	UNIT	PARAMETER INDEX	
			VALUE	TOLERATE
VHP-1301 VHP-1303	Size	mm	37 x 18.5 x 10.2	
	Weight	g	6	
	Working Voltage	V	DC 3.7V	+5%,-10%
	Working Current	mA	≤ 1.5	
	Frequency Response	Hz	280- 3200	
	Maximum Saturation Acoustic Output	dB	≤ 128	+ 3dB
	Hi-frequency average value	dB	117	± 4dB
	Full-on Acoustic Gain	dB	34	± 5dB
	Total Harmonic Distortion	%	≤ 7	+ 3%
Equivalent Input Noise	dB	≤ 29	+ 3dB	

Device Safety Level Inner Power Level: B

Attentionari

- Важно е да увеличавате звука постепенно, за да избегнете силни шумове и микрофония.
- Деца не трябва да използват това устройство.

• Използвайте зарядното устройство от комплекта или друго зарядно със следните спецификации:

ВХОД: 100V~240V, AC 50/60Hz,

0.2–0.25A ИЗХОД: 5V 1A

Предупреждения

1. Устройството не е водоустойчиво. Избягвайте влага. Ако продуктът е бил изложен на вода, уверете се, че е изключен и го поставете на сухо и топло място, за да се подсуши.
2. Използвайте продукта само когато е необходимо.
3. Изключвайте устройството, ако няма да се използва дълго време.
4. Не използвайте устройството по време на рентген, ЯМР или скенер.

Внимание: Слуховият усилвател VHP-1303 не е медицинско изделие. Препоръчва се да се консултирате със специалист за точна диагноза!

Съхранение

Съхранявайте устройството на сухо място с добра вентилация, където относителната влажност не надвишава 80%. Избягвайте излагане на корозивни вещества или газове.

Производител: Foshan Vohom Technology Co., Ltd.
Адрес: Unit 402, 4/F 1 ENT A3 Bidg, Hantian Science and Technology City, No.17 Shenhai Rd., Guicheng Town, Nanhai District, Foshan, 528200, Guangdong, Китай
Дистрибутор: Terra Axis SRL
Адрес: ул. Гидичени №39, Брагадиру, Илфов
Имейл: contact@vixev.ro

Този продукт има гаранция от 24 месеца, считано от датата на покупката. Гаранцията покрива фабрични дефекти и дефектни материали. При възникване на проблем по време на гаранционния период, моля свържете се с оторизирания дистрибутор или с оторизиран сервизен център.

За да се възползвате от гаранцията, е необходимо да представите доказателство за покупка (фактура или касова бележка). Гаранцията не покрива повреди, причинени от неправилна употреба, инциденти, неоторизирани модификации или неправилна поддръжка на продукта.

